




einfach
stabil
flexibel



TRUE/LOK™ ist einfach

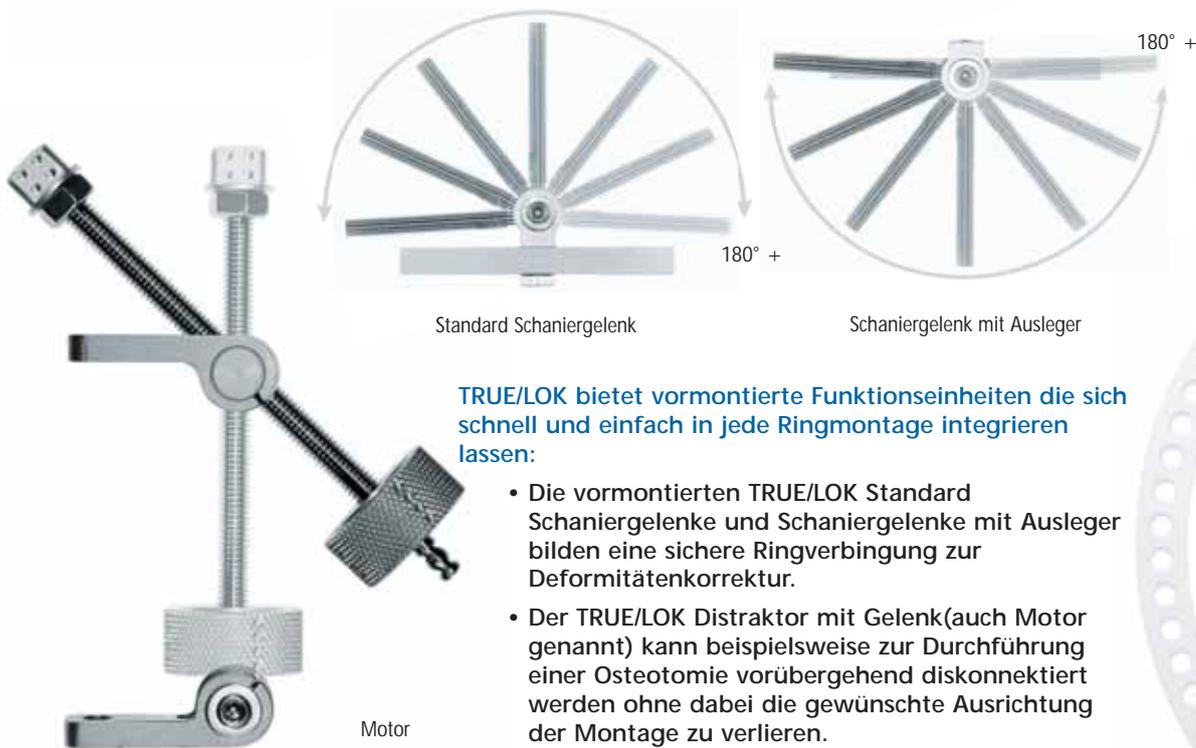

Standard Schaniergelenk

Schaniergelenk mit Ausleger

TRUE/LOK bietet vormontierte Funktionseinheiten die sich schnell und einfach in jede Ringmontage integrieren lassen:

- Die vormontierten TRUE/LOK Standard Schaniergelenke und Schaniergelenke mit Ausleger bilden eine sichere Ringverbindung zur Deformitätenkorrektur.
- Der TRUE/LOK Distraktor mit Gelenk(auch Motor genannt) kann beispielsweise zur Durchführung einer Osteotomie vorübergehend diskonnektiert werden ohne dabei die gewünschte Ausrichtung der Montage zu verlieren.

Motor



TRUE/LOK™ ist stabil



Einzelverschraubungen



Drahtfixationsstifte nehmen wahlweise in der Kanülierung oder in der Rille die K-Drähte auf.

TRUE/LOK's einzigartige Drahtfixationsstifte bzw. Einzelverschraubungen bieten exzellenten Halt.

- Die Einzelverschraubungen fixieren sicher alle Schrauben mit Schaftdurchmessern von 4 bis 6mm.
- Die Drahtfixationsstifte verfügen sowohl in der Rille als auch vor und hinter ihrer Kanülierung über ein spezielles Wellenprofil. Dieses erhöht enorm die Festigkeit und Sicherheit der Drahtfixation.
- Der enorm sichere Halt dieser Drahtfixationsstifte macht ein wiederholtes Nachspannen der Drähte überflüssig. Der Draht kann bündig mit dem Ring gekappt werden.

Teleskopdistraktoren

Sowohl während als auch zwischen den einzelnen Verstellvorgängen der Ringe bietet das patentgeschützte Plastik / Metall interface ständig eine gleichbleibende Stabilität.




Patentiertes Metall / Plastik Interface

Linearer Teleskopdistraktor


TRUE/LOK™ ist flexibel

Das modulare TRUE/LOK System gestattet mit seinen Vollringen, Halbringen und 5/8 Ringen eine patientenadaptierte Ringmontage ohne dabei eine unüberschaubare Anzahl von Kleinteilen zu benötigen.


- Die stabile, multiplanare Fußmontage kann sehr einfach individuell an jede Fußform und Fußgröße angepaßt werden.
- Alle TRUE/LOK-Gelenke können bei Bedarf blockiert werden und ermöglichen eine "Selbstausrichtung" ihrer Achse.

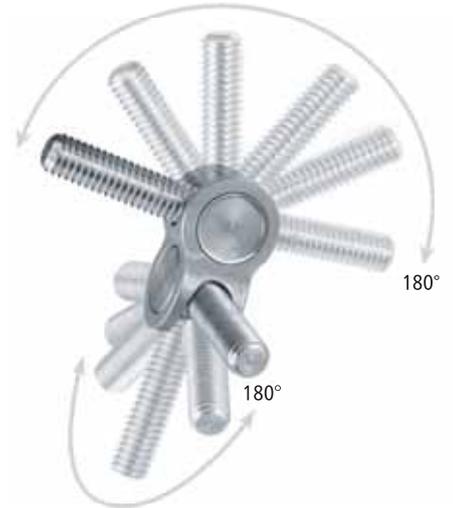


Blockierbares Universalgelenk

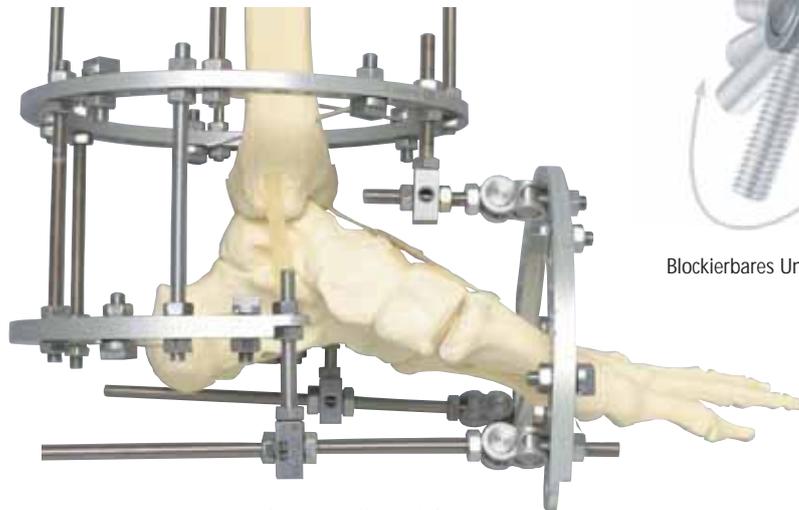

Montage zur Korrektur eines Charcotfußes

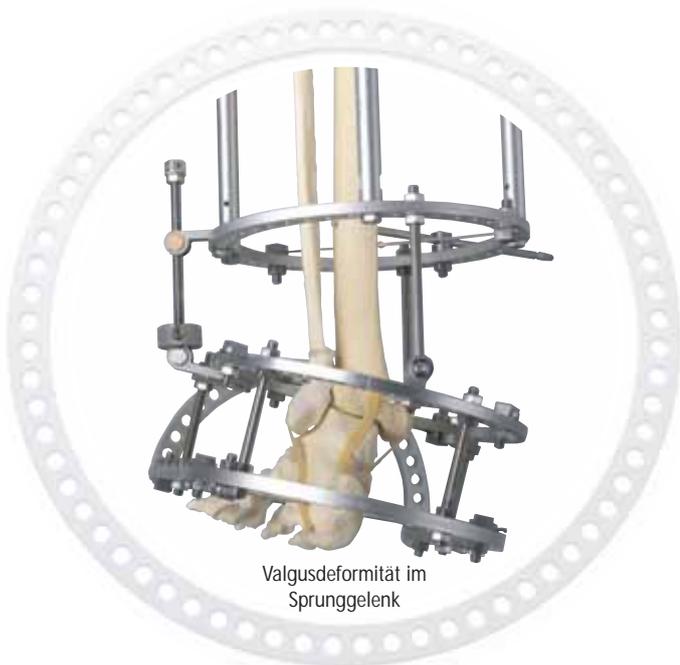

Valgusdeformität im Sprunggelenk

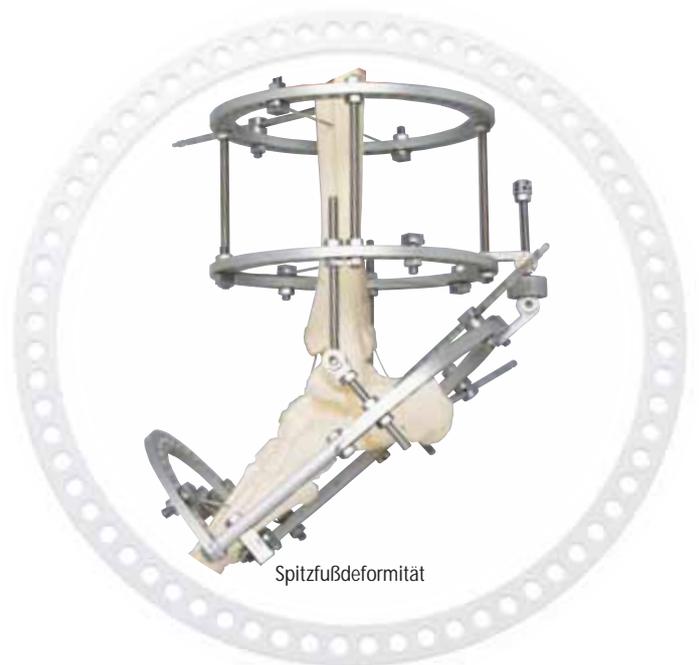

Spitzfußdeformität



52-1100C TL, STERICONTAINER FÜR GELENKE & DISTRAKTOREN		
Artikel Nr.:	Beschreibung	Menge
50-1008	10mm MUTTERN, STAINLESS STEEL	20
50-1009	10mm MUTTERN, PLASTIK	10
50-1014	LINEARER TELESKOPDISTRAKTOR, 100mm	4
50-1015	LINEARER TELESKOPDISTRAKTOR, 150 mm	4
50-1016	LINEARER TELESKOPDISTRAKTOR, 200 mm	4
50-1101	LINEARER TELESKOPDISTRAKTOR, 70 mm	4
51-1022	GEWINDESTANGE, 100mm MIT KUGELKOPF	2
51-1030	GEWINDESTANGE, 60mm MIT KUGELKOPF	1
51-1033	GEWINDESTANGE, 200mm MIT KUGELKOPF	1
51-1043	STANDARD SCHANIERGELENK	2
51-1044	SCHANIERGELENK MIT FEST MONTIERTEM AUSLEGER	2
51-1046	DISTRAKTOR MIT GELENK, "MOTOR", 100mm	1
51-1047	DISTRAKTOR MIT GELENK, "MOTOR", 150 mm	1
51-1048	ANGULAR DISTRACKTOR, EXTENDED BRACKET	1
51-1055	GEWINDESTANGE, 150 mm	1
52-1018	SCHRAUBENDREHER INNBUSS 1/8"	1
52-1020	90° INNBUSS-SCHLÜSSEL, 1/8"	1
52-1021	INNBUSS-ADAPTER FÜR BOHRMASCHINE 1/8"	1
52-1061	10mm GABELSCHLÜSSEL	1
52-1100	LEERER STERICONTAINER FÜR GELENKE UND DISTRAKTOREN	1
55-1006	GEWINDESTANGE, 115mm MIT INNBUSSANSCHLUSS	4

55-1182C TL, STERICONTAINER FÜR BÖGEN & AUSLEGER		
Artikel Nr.:	Beschreibung	Menge
55-1006	GEWINDESTANGE, 115mm MIT INNBUSSANSCHLUSS	8
55-1034	2-LOCH-AUSLEGER	4
55-1053	GEWINDESTANGE, 85mm MIT INNBUSSANSCHLUSS	8
55-1057	SPACER, 10 mm	8
55-1060	SPACER, 15 mm	8
55-1063	SPACER, 20 mm	8
55-1066	SPACER, 25 mm	8
55-1068	SPACER, 30 mm	8
55-1076	BOGEN, 90 mm, KURZ	4
55-1078	BOGEN, 90 mm, LANG	4
55-1080	BOGEN, 120 mm, KURZ	4
55-1082	BOGEN, 120 mm, LANG	4
55-1099	SCHRÄGER AUSLEGER	4
55-1169	3-LOCH-AUSLEGER	4
55-1170	4-LOCH-AUSLEGER	4
55-1171	5-LOCH-AUSLEGER	4
55-1172	GEWINDESTANGE, 60MM MIT INNBUSSANSCHLUSS	8
55-1173	GEWINDESTANGE, 200MM MIT INNBUSSANSCHLUSS	8
55-1174	GEWINDESTANGE, 300MM MIT INNBUSSANSCHLUSS	4
55-1175	GEWINDESTANGE, 400MM MIT INNBUSSANSCHLUSS	4
55-1176	TRUE/LOK UNIVERSALGELENK	4
55-1182	LEERER STERICONTAINER FÜR BÖGEN & AUSLEGER	1

54-1135C TL, STERICONTAINER FÜR FIXATIONSELEMENTE		
Artikel Nr.:	Beschreibung	Menge
50-1008	10mm MUTTERN, STAINLESS STEEL	60
54-1010	SCHRAUBE, 16mm GEWINDELÄNGE	8
54-1050	SCHRAUBE, 12mm GEWINDELÄNGE	10
54-1064	UNTERLEGSCHLEIBE ZUR DRAHTFIXATION	10
54-1117	APPLIKATOR FÜR MUTTERN	2
54-1127	1-LOCH MONTAGEQUADER MIT 12MM SCHRAUBE	4
54-1128	2-LOCH MONTAGEQUADER MIT 12MM SCHRAUBE	4
54-1129	3-LOCH MONTAGEQUADER MIT 12MM SCHRAUBE	4
54-1130	4-LOCH MONTAGEQUADER MIT 12MM SCHRAUBE	4
54-1131	UNTERLEGSCHLEIBE DÜNN, 1mm	40
54-1132	UNTERLEGSCHLEIBE DICK, 2,5mm	32
54-1133	GUMMISTOPPER FÜR DRÄHTE, ROT	10
54-1134	APPLIKATOR FÜR GUMMISTOPPER	1
54-1135	LEERER STERICONTAINER FÜR FIXATIONSELEMENTE	1
54-1136	GUMMISTOPPER FÜR KORTIKALISSCHRAUBEN, GRAU	10
54-1150	KONISCHE UNTERLEGSCHLEIBEN, PAARWEISE	15
54-1152	TL DRAHTFIXATIONSSTIFT	24
54-1153	TL EINZELSCHRAUBENHALTER	12
80131	1,8 mm x 400mm, MIT ZENTRALER OLIVE	8
80132	1,8 mm x 400mm, OHNE OLIVE	8

54-1100 TL, STERICONTAINER FÜR DAS INSTRUMENTARIUM		
Artikel Nr.:	Beschreibung	Menge
450145	LEERER STERICONTAINER FÜR DAS INSTRUMENTARIUM	1
18001	DRAHTSPANNZANGE	2
54-1155	10mm GABELSCHLÜSSEL MIT ANGULIERBAREM RINGANSATZ	2
W1003	Drahtschneidezange	1
81031	10mm GABELSCHLÜSSEL	4
80200	SCHUTZKAPPEN FÜR K-DRÄHTE, VPE = 20 STÜCK	1
10200	SCHUTZKAPPEN FÜR KORTIKALISSCHRAUBEN, VPE = 20 STÜCK	1
81025	MUTTER ZUR VERLÄNGERUNG MIT MARKIERUNGEN	4
91150	UNIVERSAL T HANDGRIFF MIT JAKOBSFUTTER	1
11007	BOHRERSET 4,8mm x 280mm	1
11003	BOHRERSET 3,2mm x 200mm	1
11125	BOHRERSET 4,8mm x 140mm	1
11116	BOHRERSET 3,2mm x 80mm	1

ZUBEHÖR

Artikel Nr.:	Beschreibung
51-1031	GEWINDESTANGE MIT KUGELKOPF, 100 mm
51-1040	SCHRAUBE 1/4
51-1052	SCHRAUBE 3/8
55-1007	GEWINDESTANGE MIT INNBUSS- ANSCHLUSS, 165 mm

BONE SCREWS AND CUTTER

Artikel Nr.:	Beschreibung
91101	BOLZENSCHNEIDER

Das gesamte Sortiment unserer Kortkallsschrauben entnehmen Sie bitte unserem Hauptkatalog.

VOLLRING		HALBRING		5/8 RING	
56-1084	80 mm	56-1157	80 mm	56-1258	100 mm
56-1086	100 mm	56-1158	100 mm	56-1259	120 mm
56-1089	120 mm	56-1159	120 mm	56-1260	130 mm
56-1090	130 mm	56-1160	130 mm	56-1261	140 mm
56-1091	140 mm	56-1161	140 mm	56-1262	150 mm
56-1092	150 mm	56-1162	150 mm	56-1263	160 mm
56-1093	160 mm	56-1163	160 mm	56-1264	170 mm
56-1094	170 mm	56-1164	170 mm	56-1265	180 mm
56-1095	180 mm	56-1165	180 mm	56-1266	200 mm
56-1096	200 mm	56-1166	200 mm		
56-1097	220 mm	56-1167	220 mm		
56-1098	240 mm	56-1168	240 mm		

FUßRING		VERLÄNGERUNGEN FÜR DEN FUßRING	
56-1358	100 mm	56-1458	3-Loch
56-1359	120 mm	56-1459	5-Loch
56-1360	130 mm	56-1460	7-Loch
56-1361	140 mm		
56-1362	150 mm		
56-1363	160 mm		
56-1364	170 mm		
56-1365	180 mm		
56-1366	200 mm		

Ihre Vertriebspartner:

Deutschland Orthofix GmbH Mühlbachweg 4 - 83626 Valley Tel. 0049 (0) 8020 – 90 83 90 Fax 0049 (0) 8020 – 90 83 99	Schweiz Orthofix AG Sumpfstrasse 5 - 6312 Steinhäusern Tel. 0041 (0) 41 – 74 85 360 Fax 0041 (0) 41 – 74 85 361
---	--

